



TERMOMETR ELEKTRONICZNY MEDYCZNY CYFROWY DZIECI

CENA: **6,21** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 5050565503374



OPIS PRZEDMIOTU

TERMOMETR ELEKTRYCZNY MEDYCZNY CYFROWY EMERGENCY DIGITAL PMS - PRODUKCJA UK

- DLA DZIECI I DOROSŁYCH

- ☐ **DOKŁADNY**
- ☐ **NIEZAWODNY**
- ☐ **BATERIA W ZESTAWIE**



□ **ZAKRES POMIARU** TEMPERATURY CIAŁA WYNOŚI OD 32 DO 42°C. TERMOMETR JEST BARDZO DOKŁADNY

CZAS POMIARU TEMPERATURY TO TYLKO 1 MINUTA!

□ TERMOMETR ELEKTRONICZNY SPRAWDZI SIĘ DO MIERZENIA:

- TEMPERATURY CIAŁA MIERZONĄ **POD PACHĄ**
- TEMPERATURY CIAŁA MIERZONĄ **W USTACH**

□ **WYŚWIETLACZ** WSKAZUJE WYSOKOŚĆ POMIARU ORAZ JEDNOSTKĘ POMIARU Z JEJ DZIESIĘTNymi WARTOŚCIAMI W °C. PO PONOWNYM WŁĄCZENIU POKAZUJE OSTATNI POMIAR. EKRAN **LCD** POSIADA **CYFROWY** WYŚWIETLACZ

□ **SYGNAŁY DŹWIĘKOWE** - TERMOMETR POSIADA TAKŻE FUNKCJE OSTRZEGANIA DŹWIĘKOWEGO. PODCZAS POMIARU, WŁĄCZANIA TERMOMETRU WYDAWANE SĄ SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

1 SYGNAŁ - WŁĄCZENIE LUB WYŁĄCZENIE TERMOMETRU, 10 SYGNAŁÓW - KONIEC POMIARU



SPECYFIKACJA:

- WYMIARY URZĄDZENIA: 12,5 X 1,8 X 0,9 CM
- WAGA URZĄDZENIA: 10 G
- WAGA URZĄDZENIA W PUDEŁKU DO PRZECHOWYWANIA: 20 G
- WAGA URZĄDZENIA W OPAKOWANIU: 36 G
- ZAKRES POMIARU TEMP. CIAŁA: 32-42°C
- DOKŁADNOŚCI POMIARU TEMPERATURY: 0,1°C
- CZAS WYKONANIA POMIARU: 1 MINUTA
- FUNKCJE: MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA
- JEDNOSTKI POMIARU TEMPERATURY: °C
- WYŚWIETLACZ LCD
- ZASILANIE: BATERYJNE 1 X AG3 (W ZESTAWIE)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE: TAK
- DYSTRYBUTOR: PMS UK

W ZESTAWIE:

- TERMOMETR ELEKTRONICZNY
- FUTERAŁ Z TRANSPARENTNEGO TWORZYWA
- ORYGINALNE OPAKOWANIE

- **BATERIA AG3 W ZESTAWIE**
- **TERMOMETR NIE ZAWIERA RTĘCI**



□ JAK MIERZYĆ TEMPERATURĘ

ZALECA SIĘ POŁOŻYĆ SIĘ NA KILKA MINUT PRZED POMIAREM TEMPERATURY.

- **UŻYCIE DOUSTNE** - 1 MINUTA

UMIEŚCIĆ SONDĘ POD JĘZYKIEM. TRZYMAJ USTA ZAMKNIĘTE. NORMALNA TEMPERATURA PRZY TEJ METODZIE TO 37°C (98,6°F).

UWAGA: METODA DOUSTNA NIE JEST ZALECANA DLA NIEMOWLĄT I BARDZO MAŁYCH DZIECI.

- **POD PACHĄ** - 1 MINUTA

UPEWNIJ SIĘ, ŻE PACHY SĄ SUCHY. UMIEŚĆ SONDĘ POD PACHĄ I MOCNO DOCIŚNIJ RAMIĘ DO CIAŁA. NORMALNA TEMPERATURA PRZY TEJ METODZIE TO 36,7°C (98°F)

CZYSZCZENIE

WYTRZYJ WILGOTNĄ SZMATKĄ.

FOR ORAL OR
UNDERARM USAGE



EMERGENCY **DIGITAL THERMOMETER**

HELPS DETECT THE EARLY SIGNS OF A FLU OR FEVER

INCLUDES
STORAGE
CASE



**COMPACT, ACCURATE
AND RELIABLE
THERMOMETER WITH
DIGITAL DISPLAY
READOUT**

EASY TO USE

IDEAL FOR ALL AGES

**VISIBLE ALERT
INDICATES WHEN
TEMPERATURE
READING IS COMPLETE**

**BRIGHT, CLEAR
LCD DISPLAY**



